



Alpaca Association Benelux

DNA project

Instructies voor fokkers

Versie 1.0 26-11-2024



Doel van het DNA project

Doel van het DNA project

Het doel van het DNA project is tweedelig:

Primair:

- Overschakelen van een registratie database naar een DNA gecertificeerd stamboek met DNA geteste ouderschapscontrole

Secundair:

- Fokkers de mogelijk geven om dieren genetisch te laten testen op hun genetische kleurcodering (colour gene testing)



Hoe gaat het in zijn werk?



Hoe gaat het in zijn werk?

DNA kaartjes
bestellen

Bloedstaal
nemen

DNA kaartjes
opsturen
naar Neogen

Hoe zien DNA kaartjes eruit?

- Hetzelfde kaartje kan gebruikt worden voor ofwel
- DNA ouderschapscontrole
 - kleurcodering
 - of als combinatie-test





Ga naar het “ledenportaal” op de AAB website



Hoe DNA kaartjes bestellen?

Klik op “inschrijven activiteiten”



Hoe DNA kaartjes bestellen?

INSCHRIJVEN VOOR ACTIVITEITEN

SELECTEER EEN ACTIVITEIT

BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES AFSTAMMING

BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES KLEURCODERING

BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES COMBI-TEST

Selecteer welke test u wenst aan te vragen:

“BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES AFSTAMMING”

Met deze test wordt een genetisch profiel aangemaakt van een dier en kan er ook nagegaan worden of andere dieren de ouders zijn (ouderschapscontrole)

“BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES KLEURCODERING”

Met deze test kan de genetische kleurcodering van een dier bepaald worden (eeaa – eeAa – eeAA – Eeaa – EeAa etc / Grey – non-grey)

“BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES COMBI-TEST”

Met deze test worden bovenstaande gecombineerd



Hoe DNA kaartjes bestellen?

BESTELLEN DNA-BLOEDKAARTJES AFSTAMMING

Datum:
10-12-2024

Prijs:
€ 22.95

Beschrijving:
Bestel hier uw DNA-bloedkaartjes voor alléén de DNA-Afstammingstest (€22,95 per alpaca)! Geef duidelijk het aantal kaartjes aan dat u wilt bestellen.

Aantal:

Opmerkingen:

INSCHRIJVEN

Klik op de test die u wilt aanvragen en geef aan hoeveel testen u wilt bestellen.

U hoeft nog niet aan te geven welke dieren u wilt testen, enkel de aantallen.

Let wel! Het aantal testen dat hier besteld wordt, wordt zo gefactureerd. Denk dus goed na hoeveel er van elke test aangevraagd wordt, want de kaartjes zijn identiek.



Hoe worden kaartjes opgestuurd?



DNA kaartjes besteld op de AAB website

Factuur wordt aangemaakt
(er wordt een forfaitair bedrag van 5€ aangerekend voor de verzendkosten)

Factuur wordt betaald door fokker

Bestelde DNA kaartjes worden opgestuurd naar de fokker

Hoe kunnen bloedstalen
genomen worden?



Hoe kunnen bloedstalen genomen worden?

Bloed kan door de fokker uit het oor genomen worden en rechtstreeks op het kaartje worden opgevangen.

Bloed kan ook uit een ader van de hals genomen worden, dit is een diergeneeskundige handeling. Raadpleeg uw dierenarts. Het bloed kan via het spuitje overgebracht worden op het kaartje.

Hygiëne is belangrijk om contaminatie tussen de stalen te minimaliseren. Was uw handen voor de bloedname, draag handschoenen en wissel deze bij elke bloedname. Ontsmet de zone met een ontsmettingsmiddel.



A DNA card template with a grey background. On the left side, there are two logos: 'Igenity.' at the top and 'GENESEEK' below it. The main area contains a barcode at the top with the number '41322065577' underneath it. Below the barcode are four horizontal lines for text, labeled '(Name)', '(Animal ID)', '(Signature)', and '(Date)' from top to bottom. On the right side, there is a small QR code and the number '41322065577' printed vertically next to it.

Name: vul hier de naam van het dier in zoals het geregistreerd staat in het AAB registratiesysteem (ZooEasy)

Animal ID: vul hier het AAB nummer in zoals het geregistreerd staat in het AAB registratiesysteem

Signature: handtekening van de fokker

Date: datum van de staalname

Wat te doen met de DNA kaartjes?

Hoe moeten de kaartjes gevuld worden?


Vul de cirkel op het kaartje met bloed. Probeer het cirkeltje mooi te vullen: niet te weinig, niet teveel.

Zorg ervoor dat enkel bloed van het welbepaalde dier op het kaartje terecht komt.

In het geval er een dierenarts aanwezig is, maar de kaartjes nog niet zijn toegekomen, kan het bloed in een EDTA tube met paarse dop bewaard worden. Zacht de tube een aantal keren omdraaien/keren en bewaren in de vriezer.



Drogen van de kaartjes

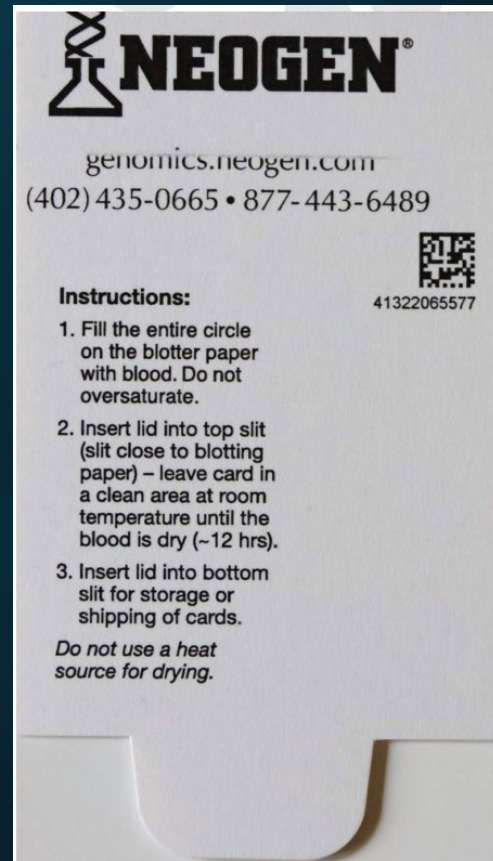


Na de staalname laat u het kaartje drogen op kamertemperatuur (ongeveer 12 uur).

Steek het bovenste deel van het kaartje in de eerste uitsparing om te drogen. Het bovenste deel van het kaartje staat bol, zodat de cirkel die met bloed is gevuld, kan drogen.

Nadien steekt u het bovenste deel van het kaartje in de tweede uitsparing zodat het kaartje vlak is.

Het kaartje is nu klaar om opgestuurd te worden.

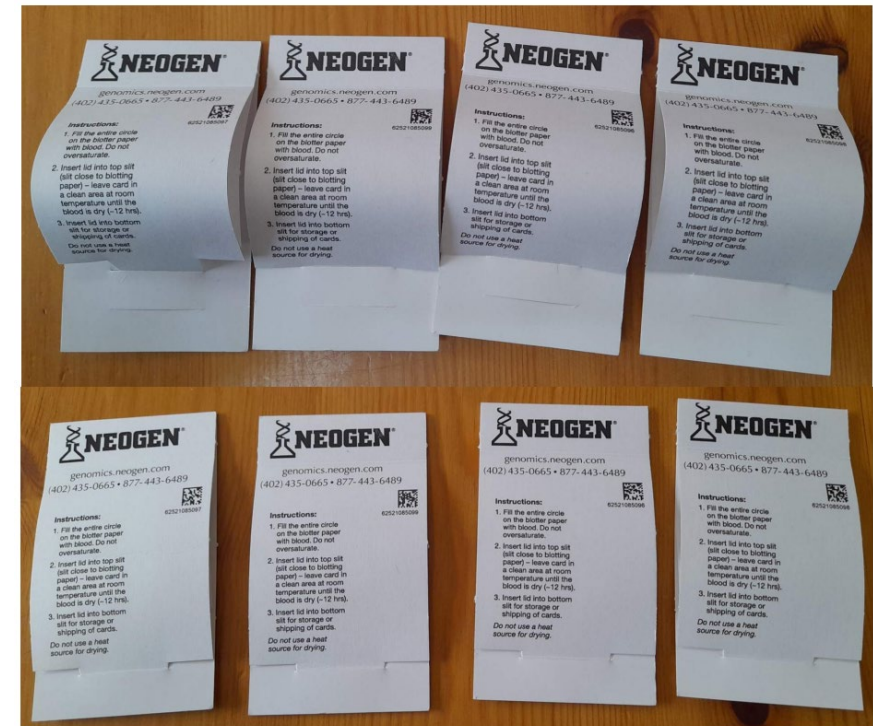

Hoe kaartjes opsturen?



Hoe kaartjes opsturen?

- Stuur de kaartjes op in de briefomslag die bij de bestelling zat
- Kies een verzendmethode naar keuze. Een track & Trace methode wordt aangeraden
- Voor Nederland stuur naar: Simone Wiegman, Tweede Compagnonsweg 10, 8415 AM Bontebok
- Voor België stuur naar: Sofie Sledsens, Doornstraat 32, 9170 Sint-Gillis-Waas



Hoe kaartjes opsturen?

- Nadat u de kaartjes hebt verzameld om op te sturen, gelieve ook een **tabel** in te vullen om aan te geven welke dieren er getest moeten worden.
- In de tabel kunt u ook aangeven welke test er juist moet gebeuren
 - DNA test voor ouderschapscontrole
 - DNA test voor kleurcodering
 - DNA combinatietest

Dit moet overeenkomen met wat er oorspronkelijk aangevraagd werd op de website en met de factuur. Indien er nog kaartjes niet gebruikt werden, kunnen die bewaard worden voor een volgende verzending.

De tabel kunt u vinden op de AAB website onder de “documenten”. Deze wordt u ook verzonden per email na de bestelling.



Welke tabel?

Een excel tabel maakt het voor de organisatie gemakkelijker om de kaartjes te controleren en op te sturen naar Neogen. Zo wordt een degelijke opvolging gegarandeerd.

De tabel kan worden teruggevonden op de AAB website onder “documenten”.

Vul de tabel in wanneer u de kaartjes opstuurt en stuur deze per email op naar dna@alpaca-benelux.com (Simone / Nederland) of sofie.dna@alpaca-benelux.com (Sofie / België).



Wat moet er ingevuld worden in de tabel?

Vul de contactpersoon, farmnaam en het adres in met emailadres en telefoonnummer

Vul de naam van het dier in "prefix farm + naam"

Geef hier aan of het dier reeds getest werd bij Neogen, maar er geen resultaat beschikbaar was? Een hertest wordt nogmaals door Neogen aangeboden

Adres lid:															
Email address:															
Telefoonnummer:															
Barcode monsterkaart <i>(In dat op het bloedkaartje staan onder de streepjescode!)</i>		AAB stamboeknummer		Diernaam		Geslacht		Soort monster		Alpaca Kleurtest ja/nee		Alpaca Ouderschapstes ja/nee		Is dit een hertest? ja/nee	
												AAB stamboeknummer vader		AAB stamboeknummer moeder	

Stuur de bloedkaartjes naar Simone Wiegman (NL) of Sofie Sledsens (B):

Voor Nederland:	Simone Wiegman Tweede Compagnonsweg 10 8415 AM BONTEBOK
Voor België:	Sofie Sledsens Doornstraat 32 9170 Sint-Gillis-Waas

Vul het nummer van de barcode in die onder de streepjescode staat

Vul het nummer van het dier in zoals het voor de AAB geregistreerd is in ZooEasy

Geef hier aan of het dier voor kleurcodering getest moet worden: ja of nee.

Geef hier aan of het dier voor DNA getest moet worden: ja of nee

Als een dier gecheckt moet worden voor ouderschapscontrole, geef je ook de ouders aan. Als er geen ouders bekend zijn, dan starten we met het huidige dier. Nadien kunnen nakomelingen getest worden voor ouderschapscontrole.